

## 全自动玻片染色机 SS-30

相关参数:	染色架容量	30个玻片
	染色程序	多达20个染色程序, 最多可达50个步骤
	总工作站数量	20个试剂缸, 带独立盖子
	试剂站	多达19个
	试剂站容量	300ml
	给水站	多达3个
	试剂装载站	多达2个
	设计卸除站	多达3个 (如带有烘干站, 那仅有2个)
	运行架数	可同时运行5架
	额定电压	100-240VAC/50-60Hz
	尺寸	1200*440*360mm
	重量	55kg
产地	西班牙	

订货信息:	名称	全自动玻片染色机 SS-30
	货号	300-000
	型号	SS-30/SS30H

CFDA备案号: 国械备20170514号

生产者名称: Especialidades Médicas MYR, S.L

生产场所地址: Vidriers 街道21号, 埃尔文德雷利, 西班牙

中国总代: 广州维格斯生物科技有限公司



维格斯官方微信

广州维格斯生物科技有限公司  
广州市增城区新塘沙埔银沙工业区  
银沙二路4号 (维格斯产业园)  
电话: 8620-8779 3718  
传真: 8620-8779 3728

维格斯集团有限公司  
香港新界元朗宏业西街33号  
元朗贸易中心1611室  
电话: 852-2567 2882  
传真: 852-2567 6333

网站: [www.wexisgp.com](http://www.wexisgp.com)  
邮箱: [marketing@wexisgp.com](mailto:marketing@wexisgp.com)

WX-CY-Y131811C

Myr 新美康™

AUTOMATED SLIDE STAINER SS-30

全自动玻片染色机 SS-30

原装进口

中小型病理科染色首选

冰冻专项染色首选



Wexis

## AUTOMATED SLIDE STAINER SS-30

### 全自动玻片染色机 SS-30

#### 灵活性



- 用于常规H&E染色、冰冻切片染色、细胞学染色和用户自定义的浸染程序；
- 采用精准的上下震荡清洗技术；
- 可同时运行5个不同的染色程序且参数调节灵活；
- 机械手臂双向运动，一个染色程序最多可设置50个步骤；
- 每个步骤都可以自行设定浸泡时间，确保每一步染色效果；
- 可适用于不同类型的染色架和多种盖玻片的适配器。

#### 最优化



- 可通过USB连接电脑，对染色程序进行编程和收集资料；
- 试剂管理系统（RMS）控制试剂的使用情况，帮助获得更好的染色质量；
- 管理员+用户模式，满足不同人员使用。

#### 人性化



- 自动断电保护装置；
- 带活性炭过滤器的排气系统，保护操作者的身体健康；
- 独立的试剂缸盖，最大限度减少试剂的挥发；
- 可选配的烘干工作站，可在线完成玻片的烘干。

#### 直观简洁的图形按键式操作界面




SS30全自动玻片染色机使用图像按键式操作界面，不容易发生损耗问题，且经久耐用。

#### 经验分享：

##### 案例一：广东省某二甲医院

**用于开展常规H&E染色、冰冻染色和巴氏染色等，一机满足多种染色需求。**  
该院病理科在引进Myr新美康染色机SS-30之前，一直采用手工染色进行染色实验，使得科室人员每天超负荷工作。在使用该染色机后，其高效率的染色和稳定的染色质量，得到技术老师的一致好评，同时极大的提升院区病理制片水平，为病理诊断提供强有力的支持。

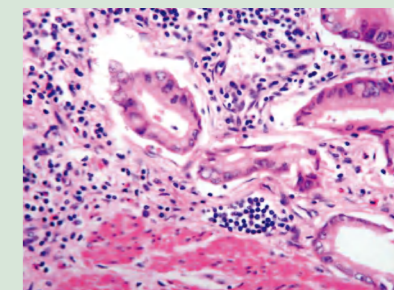

##### 案例二：“中华杯”冷冻切片技术质控测评赛 为大会测评赛提供冷冻切片染色，荣获佳绩。

2017年9月8日，全国病理技术冷冻制片装备理论与应用培训班暨首届全国病理技术“中华杯”冷冻切片技术质控测评，在陕西西安建国饭店举行。Myr新美康染色机SS-30有幸为此次测评赛提供完善的服务，并以优质可靠、稳定卓越的染色效果，获得了评委专家和参赛老师的一致好评。



##### 案例二：福建省某大型三甲医院

**勇于创新，用于开展脱钙实验，将脱钙实验标准化。**

自2017年10月份开始将Myr新美康染色机SS-30作为脱钙专用机进行科研实验，在其进行的多次骨髓脱钙实验中，技术老师反馈该机子作为脱钙使用时脱钙效果稳定且十分便利，可实施标准骨髓脱钙实验。

